

TABLE OF CONTENTS

Feridas 2

FERIDAS

LUOFUCON FOAM SEM REBORDO 10 X 10 CM, CX 10 UNI

Penso de espuma de poliuretano esterilizado, suave, maleável não adesivo Luofucon Foam Dressing sem rebordo 10x10cm

Descrição do produto:

LUOFUCON Foam é um penso de poliuretano suave, maleável e não aderente, com capacidade de absorção e retenção de fluidos, utilizado para gerir feridas com exsudado ligeiro a moderado.

Possui uma camada exterior de PU que impede o repassamento do exsudado, mas que permite as trocas gasosas de oxigénio e de vapor de água. Esta película exterior protege a ferida e é impermeável a bactérias, evitando a contaminação cruzada, condição crítica nalgumas feridas.

LUOFUCON Foam é permeável às trocas gasosas, permite a respiração da pele e mantém húmido o leito da ferida, pelo que fornece as condições ideais para a evolução do processo de cicatrização.

Composição:

Penso estéril de poliuretano (PU), sem rebordo adesivo constituído por:
1 camada externa de poliuretano/filme semipermeável sem rebordo adesivo;

1 camada interna de poliuretano absorvente (espuma hidrofílica) e de interface não aderente.

Modo de aplicação:

Limpe a ferida de acordo com os procedimentos habituais.

Escolha um penso com o tamanho e forma adequados à ferida.

Aplique o penso diretamente sobre o leito da ferida, mantendo a superfície corada para cima.

LUOFUCON Foam sem rebordo pode ser cortado.

Fixe LUOFUCON Foam sem rebordo no local da forma mais apropriada, com adesivo, ligadura ou um penso secundário adequado.

Quando substituir LUOFUCON Foam deve ser mudado quando alcançar a sua capacidade máxima de absorção, ou logo que se observar o extravasamento lateral da espuma, podendo permanecer na ferida até 7 dias.

Propriedades:

Espuma hidrófila de poliuretano

Capacidade de absorção moderada


Elevada capacidade de retenção de exsudado

Mantém o ambiente húmido

Respirável

Impermeável a bactérias

Parte superior de reduzido atrito

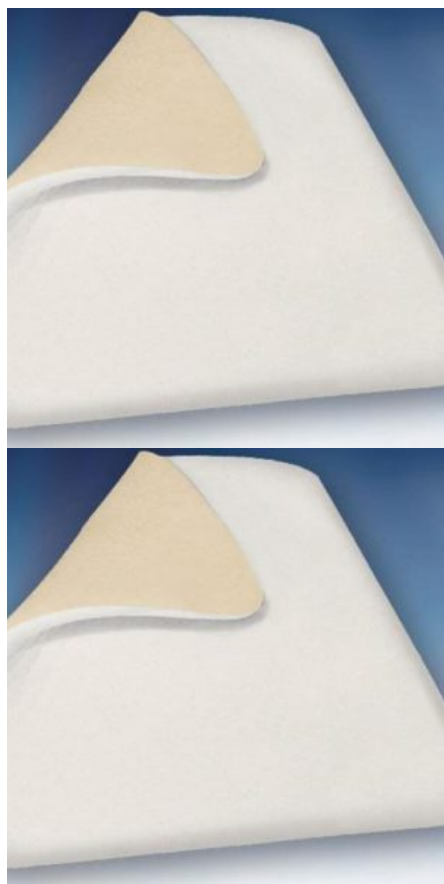

Macio e confortável

Indicações:

LUOFUCON Foam é adequado para feridas exsudativas agudas e crónicas, incluindo:

Cortes e abrasões

Queimaduras superficiais

Feridas cirúrgicas

Úlceras de perna

Úlceras de pressão

Úlceras diabéticas

Advertências:

Não aplicar em feridas com sangramento arterial nem em tumores vasculares malignos.

[consulte Mais informação](#)

SKU: FD100100U

Preço: 14.36€

INDEX

L

Luofucon Foam sem rebordo 10 x 10 cm, Cx 10 uni 1